

Amplificateurs de voix

POUR QUI ?

Un amplificateur de voix est au départ conçu pour pallier à un éventuel manque de volume sonore lors d'une conversation pour toute personne présentant un minimum de problèmes d'articulation. Cet appareil ramènera le volume sonore à un niveau audible pour l'entourage, permettant ainsi de prendre part plus aisément à une conversation tout en ménageant ses cordes vocales.

FALCK

Les amplificateurs de voix FALCK de par leurs hautes qualités et leur grande compacité, appartiennent au groupe des appareils assez onéreux. Deux appareils sont à présent disponibles sur le marché : le FALCK 1001 et le FALCK 1003.

Ces deux appareils sont dédiés aux personnes éprouvant des difficultés à se faire comprendre de leur entourage. Difficultés dues à un manque de force et/ou de volume sonore lorsqu'elles parlent mais qui ont néanmoins conservé une bonne articulation (maladie de Parkinson). Tous deux permettent d'élever le volume sonore de leur parole de manière significative.

Ils se présentent sous forme d'un petit boîtier ovale contenant la partie amplification avec haut-parleur et les accus rechargeables (autonomie d'une bonne dizaine d'heures). Ce qui les différencie : le FALCK 1001 intègre un flexible servant de support au micro à son extrémité et en fait un appareil d'un seul tenant alors que le FALCK 1003 a recourt à un casque supportant le microphone et opte donc pour une configuration en deux parties : boîtier renfermant l'amplification, haut-parleur et batteries d'une part et casque microphone de l'autre. Les micros des deux appareils sont également recouvert d'un petit mousse anti-bruit de vent.



Falck 1001



Falck 1003

SPECIFICATIONS

Poids : environ 150gr

Dimensions : boîtier ovale +/- 10 cm

Couleur: noir

Alimentation: 2 batteries rechargeables Lithium-Ion.

Volume: réglable, maximum 3W

FACILITE D'UTILISATION

Ces appareils sont très faciles d'utilisation et ne requièrent aucun apprentissage spécifique : ils se portent tous deux autour du cou, se règlent aisément en ce qui concerne la mise sous et hors tension ainsi que le volume (à l'aide de 3 boutons à pression : On/Off , Vol+ et Vol-) et la distance bouche-micro se règle pour le Falck 1001 à l'aide de la cordelette dont on ajuste la longueur tandis que pour le Falck 1003 on positionnera le flexible de manière adéquate par rapport à la bouche.

HMC N.V.

E3-Laan 87 - 9800 Deinze (Belgium) - ☎ 32 -(0)9-380 19 72 - 📠 32-(0)9-380 14 57 - 🌐 www.hmc-nv.com